



Bruksanvisning för Stirex tänger av härdat stål

Artikelnr: P-1B, P-2B, P-1L, P-2L, P-20B, MT-70

Säkerhet:

- Använd inte produkten på annat sätt än vad som är avsett.
- Var försiktig då tångfronten kan vara vass.
- Förvara tången på ett säkert sätt och utom räckhåll för barn då den inte är avsedd att användas av eller i närheten av barn.
- Undvik att använda tången till sådant som den inte är avsedd för.
- Undvik att använda tången om ni känner smärta eller obehag i samband med användandet av den.

Användning:

Stirex tänger har samma användningsområden som vanliga tänger. Stirex tänger är utrustade med ett fjäderband vilket ger en mjuk återfjädring som underlättar både i ett förebyggande syfte och vid svaghet i handen eller tumbasen. Fronten av härdat stål är ingjuten i handtag av miljövänlig plast (pp).

Stirex tänger kan användas som griphjälpsmedel på många olika vis både i hemmet och på arbetsplatsen.

Skötsel: Tången kan maskindiskas. Handdisk är skonsammast.

Teknisk specifikation:

| Art nr: | Benämning: | Frontlängd: | Vikt: |
|---------|------------------|-------------|-------|
| P-1B | Stirex Tång | 4,5 cm | 26 g |
| P-2B | Stirex Tång | 4,5 cm | 27 g |
| P-1L | Stirex Tång | 4,5 cm | 28 g |
| P-2L | Stirex Tång | 4,5 cm | 28 g |
| P-20B | Stirex Tång | 4,5 cm | 20 g |
| MT-70 | Stirex Multitång | 12 cm | 104 g |

Material:

Handtag: Moplen, Polypropylene (PP) - Överensstämmer med LIVSFS 2011:7.1

Spring: Rislän BESVO A FDA resin, Polyamide 11 (PA) - Producerat från förnybart material. Innehåller en försumbar del oligomerer och är speciellt framtagen för livsmedelskontakt.

Front: Härdat stål - Uppfyller lagliga krav på material och föremål med livsmedelskontakt i enlighet med EC direktiven 1935/2004 (REACH) och 2023/2006 (GMP). De innehåller inte SVHC eller någon annan substans i enlighet med REACH 1907/2006.

Tillverkare:

Stirex Innovation AB, Eriksbergsvägen 30b, 191 41 Sollentuna, Sweden, Tel: +46-8-760 02 55
www.stirex.se * info@stirex.se